



PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ALLIAGE

REVISÃO: DEZEMBRO DE 2024

EAGLE EDGE – SAEVO - PREXION

PAN ONLY – PAN+TELE – TOMO ONLY – TOMO+PAN – TOMO+PAN+TELE

Seguir todos os passos relacionados abaixo.

A Manutenção preventiva para a linha de imagem extra-oral é recomendada para cada 1 ano ou 10mil disparos, o que acontecer primeiro.

ETAPA VALIDAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E BACKUP DE INFORMAÇÕES.

VERIFICAÇÕES	MENSAL (CLIENTE)	ANUAL / 10 MIL DISPAROS (TECNICO)	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICAVEL	OBS.
1-Verificar tensão de entrada e saída do estabilizador		X				
2-verificar funcionamento do ar-condicionado	X	X				
3-Verificar funcionamento do computador e se atende as especificações exigida pela fábrica (processador, memória ram, HD, Placa de rede e placa de vídeo).		X				
3-Avaliação física do equipamento		X				
4-Teste de Funcionamento- Coluna	X	X				
5-Teste de funcionamento- Apoio de queixo	X	X				
6-Teste de funcionamento- Laser	X	X				
7-Teste de funcionamento- Apoio de têmpora	X	X				

8-Teste de funcionamento- Apoio Nasal	X	X				
9-Teste de funcionamento- Giro Craniano	X	X				
10-Teste de funcionamento- Olivas	X	X				
11-Teste de funcionamento- Disparador Local	X	X				
12- Teste de funcionamento- Disparador Externo	X	X				
13-Teste de funcionamento- Teclado de membrana Pan/Tomo	X	X				
14-Teste de funcionamento- Teclado de membrana Tele	X	X				
15-Sensor "Snap-On" encaixa corretamente/Limpeza dos contatos com alcool isopropilico	X	X				
16-Teste de imagem - todos os perfis disponiveis		X				
17-Verificar log de erro (software/cabeçote)		X				
18-Quantidade de disparos executados.						Pan = Tele = Tomo =

ETAPA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES E PEÇAS RECOMENDADAS

PEÇAS	MENSAL (CLIENTE)	ANUAL / 10 MIL DISPAROS (TECNICO)	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICAVEL	OBS.
1-16000003598 KIT DISPARADOR EXTERNO EAGLE EDGE		X				
2-16000003552 KIT DISPARADOR LOCAL EAGLE EDGE		X				

3-31000003155 TECLADO MEMBRANA POSICIONAMENTO		X				
4-31000003266 TECLADO MEMBRANA TELE		X				
5-16000003597 KIT CABO REDE ETHERNET EAGLE EDGE (15M)		X				

AValiação Mecânica e Elétrica do Equipamento

Procedimentos Checagem	MENSAL (CLIENTE)	ANUAL / 10 MIL DISPAROS (TECNICO)	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICAVEL	OBS.
1-Avaliação da fixação do equipamento		X				
2-Nivelamento geral		X				
3-chicotes/cabo de rede		X				
4-sensores		X				
5-Limpeza dos coolers		X				
6-Limpeza dos contatos: Placas Dock e Snap		X				
6-verificação da fixação das placas eletrônicas		X				
7-verificação dos aterramentos		X				
8-todos os parafusos apertados e devidamente acomodados		X				

9-Verificação das engrenagens, correias, Fusos, rolamentos e trilhos.		X				
10-Lubrificar fusos Graxa (81003-005) GRAXA MOLYKOTE BR-2 NLGI-2 graxa de sabão de lítio, lubrificantes sólidos aditivos EP, óleo mineral, MoS2		X				
11-Lubrificar trilhos Graxa(45302100027) GRAXA RENTAL MULTI MP2 BLUE Graxa a base de óleo mineral e sabão de Lítio		X				

BACKUP DE INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ANTERIOR A DEZ-2022

Atualização de equipamentos anteriores a 2022	MENSAL (CLIENTE)	ANUAL / 10 MIL DISPAROS (TECNICO)	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICAVEL	OBS.
1-O cliente autoriza a exclusão do banco de dados dos pacientes (Software Eagle Eye). -Sim (conforme) Atualiza o equipamento Não (não conforme) Não atualiza o equipamento.		X				
2-Salvar dados da impressora		X				
3-Salvar os dados do DICOM Worklist e PACS		X				
4-Realizar BKP das imagens		X				
5-Atualização do software: Versão de (_____) para (_____)		X				

BACKUP DE INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE POSTERIOR A JAN 2023.

Atualização de equipamento posterior 2023	MENSAL (CLIENTE)	ANUAL / 10 MIL DISPAROS (TECNICO)	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICAVEL	OBS.
1-Salvar dados da impressora		X				
2-Salvar os dados do DICOM Worklist e PACS		X				
3-Manter o banco de dados (PostgreSQL)		X				
4-Salvar arquivo config. C:\ProgramData\Eagle\settings		X				
5-Realizar BKP das imagens		X				
6-Atualização do software: Versão de (_____) para (_____)		X				

CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO.

Procedimentos	MENSAL (CLIENTE)	ANUAL / 10 MIL DISPAROS (TECNICO)	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICAVEL	OBS.
1-Calibração do equipamento		X				
2-Teste de imagem - todos os perfis disponíveis		X				
3-Qualidade da imagem Pan/Tele/tomo		X				
4-Realizar BKP(Calibração Eagle Service/EEPROM placa Main/PDF relatório final)		X				
5-Limpeza geral do equipamento		X				